



[제품명] 점착성투명 창상피복재 (Dermatix® Ultra Gel)

[형명] Dermatix® Ultra Gel 더마틱스 울트라 겔

[품목인증번호] 제수인09-166호

[주성분] 사이클로펜타실록산폴리실리콘-11, 페닐트리메치콘폴리실리콘-11, 폴리디틸실록산 등

[사용목적] 오래되거나 새로 생긴 비대성 또는 켈로이드성 흉터와 아문 상처관리

[사용방법]

가. 사용 전의 준비사항

상처가 아물고 피부표면 손상이 없어진 후 사용한다.

나. 사용방법

아침, 저녁으로 1일 2회 또는 의사의 지시에 따라 흉터 부위에 투여한다. 흉터 부위를 씻고 건조시킨 후 이 제품을 소량 취하여 부드럽게 마사지 한다. 너무 많은 양을 취한 경우 과량을 티슈로 부드럽게 제거하여 옷에 얼룩이 생기지 않도록 한다. 일단 건조된 후에는 화장품 브러쉬로 화장을 할 수 있다. 본 품은 어린이에도 사용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

가. 사용시 주의사항

- 1) 열린 상처나 새롭게 난 상처에 사용해서는 안된다.
- 2) 점막이나 눈에 가까운 부위에 사용해서는 안된다.
- 3) 항생제는 다른 피부치료제를 바른 후 사용해서는 안된다.
- 4) 깨끗하고 건조한 피부에만 사용해야 한다.
- 5) 사용기한이 지난 제품을 사용하지 말아야 한다.

나. 이상반응



MENARINI
한국메나리니(주)

드물게 피부발적, 동통 또는 자극감이 일어날 수 있다. 이런 또는 다른 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사와 상의하십시오.

다. 보관시 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 열을 피하여 보관한다.

[포장단위] 30g/튜브, 15g/튜브, 7g/튜브,

[저장방법] 25°C 이하 보관

[개정년월일] 2017.08.03